


CLEAN 2800

УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ВАННА



ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
ПАСПОРТ

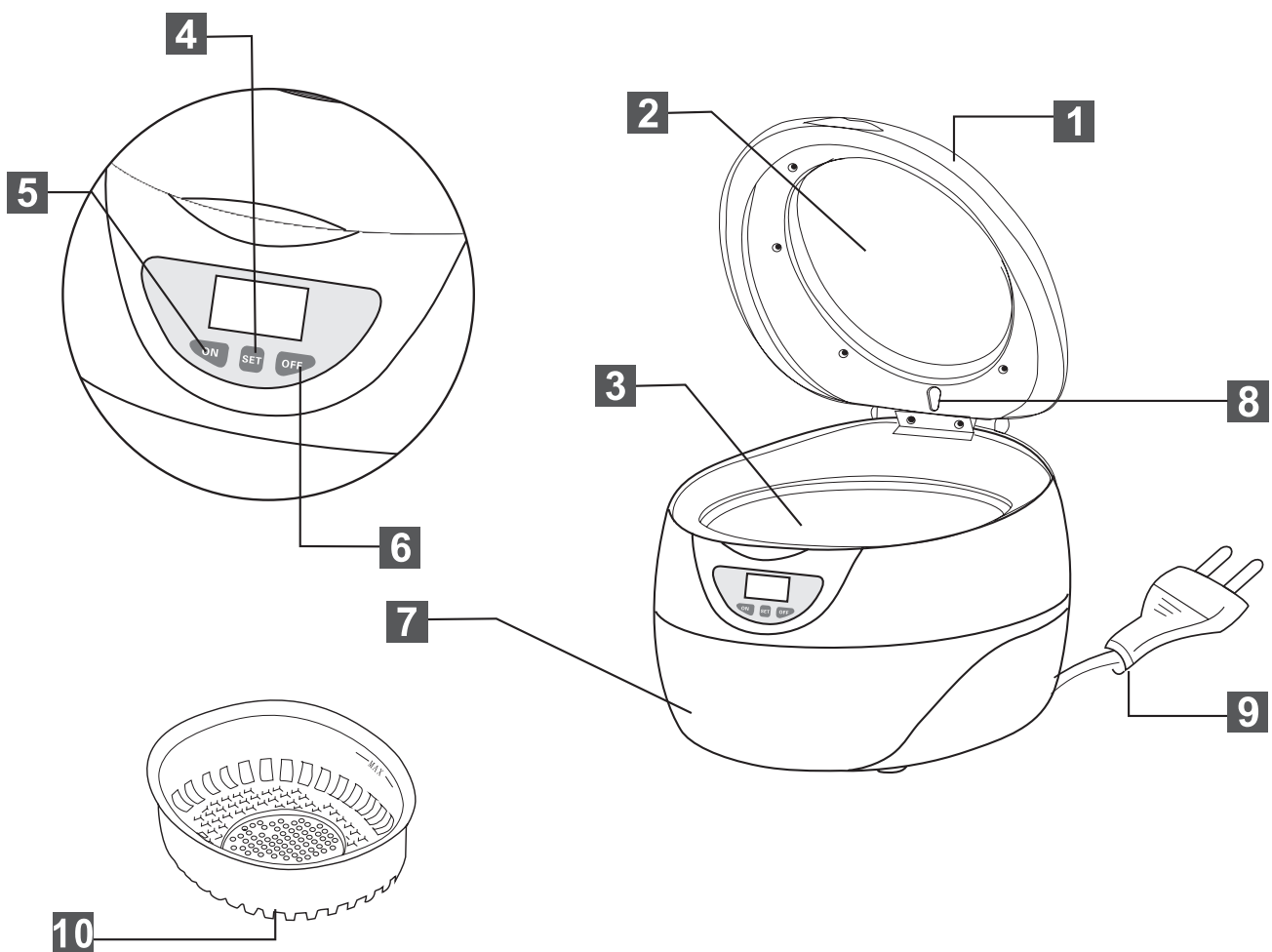

Комплектация и элементы управления:


1. Крышка
2. Окно обозревания
3. Контейнер из нержавеющей стали
4. Кнопка настроек (Set)
5. Кнопка включения (On)
6. Кнопка выключения (Off)
7. Корпус
8. Световой индикатор
9. Сетевой шнур (розетка)
10. Пластиковая корзина

Ознакомьтесь с руководством по эксплуатации

Внимательно прочтите инструкцию перед использованием. Соблюдайте меры предосторожности во избежание травм, аварий и несчастных случаев. Следующие инструкции предназначены для того, чтобы помочь вам ознакомиться с устройством и способами его эксплуатации. Устройство оборудовано всеми необходимыми комплектующими. Вам необходимо внимательно ознакомиться с инструкцией, и следовать указанным в руководстве действиям. Пожалуйста, сохраняйте инструкцию.

Технические характеристики:

- 1. Цифровое управление
- 2. 5 рабочих режимов
- 3. Емкость из прочной, нержавеющей стали
- 4. Объем контейнера: 750 мл
- 5. Ультразвуковая частота: 42000 Гц

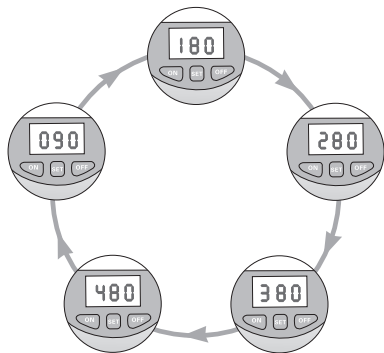

Спецификация

Наименование	Аппарат для предстерилизационной очистки	Источник питания	АС 220-240В 50 Гц
Модель	CLEAN 2800	Мощность	50 Вт
Размеры	207x174x140 мм	Настройка таймера	180, 280, 380, 480, 90 сек
Объем корзины	550 мл	Вес	1.10 кг

Меры предосторожности:

Не производите самостоятельный разбор/ремонт оборудования. При необходимости обращайтесь в авторизованную сервисную службу.

Не добавляйте в ванну едкие чистящие средства.

Отключите оборудование перед наполнением водой. Не превышайте максимально допустимый уровень воды (Max).

Во избежание удара электрическим током не погружайте прибор в воду.

Во избежание удара электрическим током не прикасайтесь к розетке мокрыми руками.

Не оставляйте прибор включенным без присмотра.

Не перегружайте линию питания.


Никогда не используйте оборудование, если шнур или розетка повреждены. При неисправности оборудования, его повреждения или в случае падения в воду, верните оборудование в сервисный центр для ремонта и/или замены.




Любой мягкий инструмент может быть испорчен под воздействием ультразвука. Не используйте изделия, не предназначенные для ультразвуковой чистки. Например, изделия из текстиля, кожи, дерева и т.д.

Не используйте прибор для чистки мобильных телефонов, часов, любых водонепроницаемых вещей, а также керамических оправ, (в том числе оправ для очков).


Не используйте прибор, без воды.

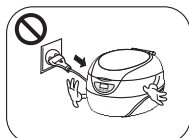


Отключите прибор от питания сразу же после использования.

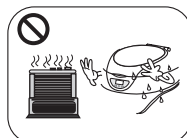


Храните прибор и розетку вдали от нагревательных приборов, в сухом, ровном месте.

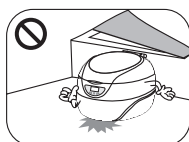


Храните прибор в надежном месте, исключая риск попадания в воду или другие жидкие вещества.

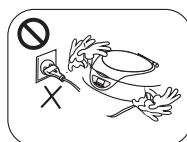

Не оставляйте прибор включенным без присмотра.

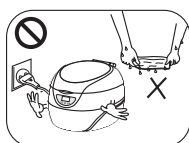

Не используйте прибор во время контакта с водой (умывания, стирки и т.д.)

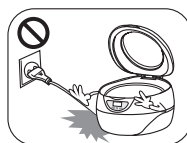

Не погружайте прибор в воду или другие жидкости.



Не прикасайтесь к прибору, если он упал в воду. Немедленно отключите его от питания.


Руководство по эксплуатации:

Применение:


Ультразвуковая чистка небольших медицинских, стоматологических инструментов, стоматологических боров, эндодонтического инструментария, где требуется детальная очистка (отмывка) изделий в трудно-доступных местах



Откройте крышку, и наполните стальную емкость водой. Внимание! Использование прибора без воды может испортить его.

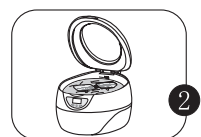


Инструменты должны быть полностью погружены в воду. Однако, не превышая уровня «Max».

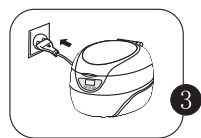


Закройте крышку и включите прибор в сеть.



Нажмите кнопку «SET» (настройки) для выбора рабочего режима. После включения прибора в сеть на дисплее автоматически выводится цикл 180сек. Это наиболее используемый режим работы. Каждый раз нажимайте кнопку «SET» для выбора нужного режима.

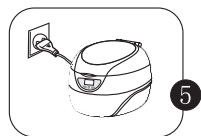

Нажмите кнопку «ON» для того, чтобы начать чистку. При этом загорится красный световой индикатор. Время до конца чистки выводится на экране. Во время чистки вы можете услышать жужжание, что указывает на то, что прибор работает нормально.

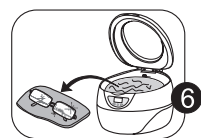

Когда время на экране указывает 000, прибор автоматически останавливается, красный световой индикатор погаснет. При необходимости дополнительной чистки повторите вышеуказанные действия. Для того, чтобы остановить процесс чистки, нажмите кнопку «OFF». При нажатии кнопки «ON» процесс чистки продолжится. При этом вы можете кнопкой «SET» выбрать нужный рабочий режим чистки.




После завершения чистки отключите прибор от розетки, откройте крышку и выньте инструменты из прибора. А затем вылейте воду из ванночки и насухо протрите ее.


Способы очистки:



Основная чистка. Используйте обыкновенную воду для чистки. Инструменты должны быть полностью погружены в воду, но не превышайте уровня «Max».

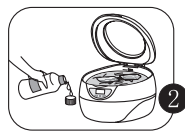

Усиленная чистка. Если инструменты сильнозагрязненные или же не очищались в течение длительного времени, добавьте в воду 5-10мл. чистящего средства.

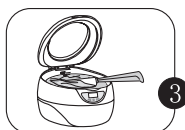

Частичная чистка. Для чистки больших инструментов, сложите их как показано на рисунке.




Глубокая чистка. Если же инструменту необходима глубокая чистка или стерилизация, используйте «Усиленную чистку», а затем смените воду и добавьте 5-10мл. жидкого мыла (используемого для мытья рук) в корзину с водой и начните чистку в режиме 90 сек.

Технические рекомендации:



После использования, вылейте воду, промойте и вытрите насухо контейнер и поверхность корпуса.

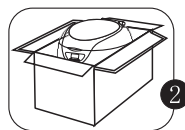

Храните прибор в сухом, защищенном от света месте.

Использование дополнительных аксессуаров:

При необходимости чистки малых инструментов положите их в пластиковую корзину, затем следует погрузить пластиковую корзину в контейнер. При этом трение содержимого о контейнер уменьшается. Пожалуйста обратите внимание на то, что пластиковая корзина используется для чистки только малых предметов, так как оно поглощает порядка 30% энергии ультразвука, и уменьшает эффективность очистки. В таком случае, при использовании пластиковой корзины, обращайтесь к инструкции по «Усиленной чистке»

Гарантия:

В пределах сроков поставки производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию и форму, комплектацию, отклонения в оттенках цвета – без предварительного предупреждения.



Гарантия действительна только при наличии правильно и четко заполненного гарантийного талона, печати и товарного чека.

Изделие снимается с гарантии, если оно имеет следы постороннего вмешательства, обнаружены несанкционированные изменения конструкции или схемы изделия, были превышены объемы выполняемых работ, рекомендованных производителем.

Гарантийный талон № _____	Дата изготовления: _____
Изделие _____	Модель _____
Серийный номер _____	Дата продажи _____
Компания-продавец _____	
Подпись продавца _____	
Печать и телефон компании продавца _____	
Изделие проверено полностью,	
Покупатель _____	с условиями гарантии ознакомлен _____
Адрес и телефон покупателя _____	

Гарантийный талон № _____	Дата изготовления: _____
Изделие _____	Модель _____
Серийный номер _____	Дата продажи _____
Компания-продавец _____	
Подпись продавца _____	
Печать и телефон компании продавца _____	
Изделие проверено полностью,	
Покупатель _____	с условиями гарантии ознакомлен _____
Адрес и телефон покупателя _____	